

Provningsmetod

av kombinationer personlyftar – lyftselar utförda av **Hjälpmiddelsinstitutet Göteborg**

Lyftsele: storlek medium

Lyftbygel: Lyftbyglar enligt lista är monterade på antingen taklyft eller hjullyft.

Provperson: Kvinna, längd 172 cm, vikt 65 kg

Utförande:

Lyftselen **lyftband** kopplas på lyftbygel i första hand i dess yttersta läge. Lyftselar med fler infästningspunkter testas vid behov med alternativa kopplingar. Om ej annat anges i leverantörens bruksanvisning, korsas **benstöden** på samtliga lyftselar med delade benstöd. I annat fall är lyftselen placerad enligt anvisning. Amputationsselar testas med benstöden kopplade omlott och i kors. Resultaten redovisas separat.

Provpersonen lyfts från sittande (bild 1)

Vid test av lyftväst gör provpersonen en uppresning till stående med lyftbygel placerad bakom provpersonen (bild 2)

Följande kombinationer provas inte:


- Lyftsele – lyftbygel från en och **samma leverantör** (leverantören tar alltid ansvar för sina egna produkter)
- Storlek XXS, XS, XL, XXL (eller motsvarande)
- Ståsele/ lyftväst i kombination med **hjullyftar** av annat fabrikat än ståselen/lyftvästen.
- Amputationsselar med omlottkoppling på 3- och 4-punktsbygel.
- Lyftselar med odelade benstöd på 3-punktsbygel.
- Lyftselar vars modell endast möjliggör att man har armarna placerade på insidan av lyftselen, testas inte på lyftbyglar som är **35 cm eller smalare**.
- Kombinationer mellan två olika leverantörer **där tillbehör** såsom tex sidobyglar ska användas till lyftselen.

Resultat:

Kriterier för att inte rekommendera en kombination är:

1. När brukarens huvud slår i lyftbygel före och under lyftet (bild 3.)
2. När brukaren faller eller glider ofrivilligt ur lyftselen
3. När yttersta läget på lyftselen bandöglor inte går att trä på bygelkroken
4. Lyftselar i storlek L och större rekommenderas inte på lyftbyglar smalare än 35 cm. Lyftselar i storlek S eller mindre rekommenderas inte på lyftbyglar bredare än 58 cm.

Teckenförklaring:

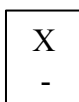

Godkänd kombination

Ej godkänd

Tom ruta – Ej provad kombination

När maxlasten är olika på personlyften respektive lyftselen, är det den lägsta maxvikten som gäller!

OBS! Avvikelser från testpersonen, i fråga om storlek, individuella mått mm, eller om lyftselen lyftband med hänsyn till brukaren bör kopplas annorlunda, kan ge ett annat resultat än det som framgår av listan. Om kombinationen då ej rekommenderas enligt kombinationslistan – ta kontakt med berörda leverantörer för ett godkännande.

Storlek, material och de individuella behov hos brukaren som finns med i bedömningen vid val av lyftsele, avgörs i utprovningssituationen där brukaren medverkar.

Kombinationslistan ersätter inte en individuell utprovning!