

Vad gör jag...

... om det är ett sträck eller en tom ruta för en kombination som fungerar?

Ibland uppnås en bra symmetri i lyftet genom att använda förlängningsband eller olika nivåer på lyftselen lyftband.

– Kontakta de leverantörer som ingår i kombinationen, beskriv anpassningen och be om ett skriftligt godkännande för den specifika utprovningen.

... om lyftselen behöver anpassas med förlängningsband?

De flesta leverantörer har förlängnings-/anpassningsband i sitt sortiment. En gemensam uppfattning är att man ska använda förlängningsband från samma leverantör som lyftselen. Korsade sortiment kan vid behov användas att trä över lyftselen benstöd – se bild 4. På så vis minskas öppningen mellan benstöden.

Periodisk besiktning av personlyftar och lyftselar

Periodisk besiktning bör utföras med de tidsintervall som anges av tillverkaren, dock minst en gång per år. Med periodisk besiktning menas en visuell kontroll och de funktionsprov och underhållsåtgärder som kan behövas. Varje besiktning bör inkludera ett arbetsprov under en cykel med maxlast.

Periodisk besiktning av de mjuka kropps bärande enheterna (lyftselar) bör utföras vid de tidsintervaller som bestäms av tillverkaren och enligt tillverkarens anvisningar men minst var 6:e månad. Tätare besiktningar kan krävas när lyftselen används eller tvättas oftare än normalt. Vid en periodisk besiktning kontrolleras bl a lyftselen märklapp – att den är läslig och att lyftband, sömmar och tyget är intakt.